

Instrukcja pakowania materiału biologicznego do transportu przez zewnętrzną firmę kurierską

1. Materiał biologiczny umieszczamy w przeznaczonych do tego celu pojemnikach. Upewniamy się że są szczelnie zamknięte.
2. Probówki oklejamy kodami kreskowymi zgodnymi z kodami na skierowaniu, następnie umieszczamy w woreczkach strunowych (skierowania w osobnym woreczku).
3. Jeśli materiał musi być transportowany w specjalnych warunkach (chłodzenie, mrożenie, ochrona przed światłem) odpowiednio go zabezpieczamy – styropian, wkłady chłodzące itp.
4. Zamówienie kuriera zewnętrznego odbywa się przez zgłoszenie telefoniczne do oddziału warszawskiego pod numer 22 349 68 00 lub wysłanie maila na adres: weterynaria@alab.com.pl
5. Po otrzymaniu listu przewozowego prosimy o zapakowanie próbek do zewnętrznego opakowania (np. karton, styropian), które będzie zabezpieczać materiał przed zgnieceniem. List przewozowy naklejamy na wierzch paczki.
6. Dodatkowo na min. 1 z boków opakowania naklejmy etykietę o zawartości materiału biologicznego UN 3373 – grafikę można pobrać [\[tutaj\]](#).



**BIOLOGICAL SUBSTANCE
CATEGORY B**